


braintronics®

Body&Mind syncSystem

CASADATM
healthcare

▼ time to relax

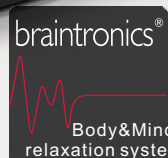

Ръководство за потребителя BETASONIC II



time to relax

Още от създаването си през 2000 година марката CASADA е синоним на висококачествени продукти в областта на уелнеса и фитнеса.

Днес продуктите CASADA се предлагат в страни по цял свят. Продуктите CASADA се отличават с постоянно усъвършенстване, оригинален дизайн и стриктна насоченост към подобряване качеството на живот, както и с надеждно и превъзходно качество.

Поздравления!

С покупката на този масажен уред Вие доказахте, че се отнасяте съзнателно към своето здраве.

За да можете да ползвате дълго време предимствата на уреда, моля прочетете внимателно указанията за безопасност и ги спазвайте.

Надяваме се с удоволствие да се насладите на своят собствен BetaSonic II.

Съдържание

Инструкции за безопасност	4
Противопоказания	5
Описание на продукта	6
Дистанционно управление	7
Инструкции за монтаж	12
Масажни техники	15
Отстраняване на неизправности	19
Съхранение и грижи	20
Характеристики	20
Декларация за съответствие	20
Braintronics	21
Гаранционни условия	31

Инструкции за безопасност



Преди да използвате масажното кресло, моля прочетете внимателно инструкциите, за да осигурите безпроблемното му функциониране и ефективност. Моля пазете това ръководство!

- Масажното кресло е в съответствие с всички европейски стандарти и действащи разпоредби за безопасност.
- Масажното кресло има подгряващи елементи. Подгряващата функция не се препоръчва за лица със силна чувствителност към топлина. Креслото отговаря на европейският стандарт (IEC 60335-2-32).
- Масажиращото кресло не се нуждае от допълнителна поддръжка. Всеки необходим ремонт трябва да бъде извършван в оторизиран сервиз.
- Всеки неоторизиран ремонт и неправилна употреба на креслото води до отпадане на гаранцията!
- За да избегнете наранявания, моля не слагайте ръцете си между масажиращите ролки.
- Не докосвайте щепсела на креслото с мокри или влажни ръце.
- Не позволявайте креслото да бъде излагано продължително време на високи температури или слънчева светлина. Избягвайте да мокрите креслото с вода или други течности!
- Не използвайте креслото в помещения с висока влажност, като баня и др.
- Не използвайте креслото в помещения с недостатъчно пространство, лоша или не работеща вентилация, помещения с недостиг на свеж въздух!
- За да се избегне рискът от късо съединение, изключвайте креслото от контактната мрежа, когато не се използва за дълъг период от време.
- Не използвайте неизправни или повредени щепсели, захранващи кабели, разклонители или контакти.
- При повреда или неизправност на захранващия кабел или щепсела, те трябва да бъдат поправени или подменени **САМО** в оторизиран сервиз!
- В случай на неизправност или повреда, веднага изключете креслото от контакта.
- Производителят не носи отговорност при повреда, ако креслото е било използвано неправилно.
- За да избегнете пренатоварване на мускулите, не надвишавайте препоръчителното време от 30 минути масаж на ден.
- За да избегнете нараняване на креслото, пазете го от остри предмети.
- За да намалите рискът от късо съединение или пожар е важно да използвате само контакти в изправност и такива, в които щепселът влиза плътно и докрай.
- Изключете креслото от контакта след употреба и преди да го почистите.
- Не позволявайте на деца да почистват или използват креслото без надзор.
- Ако по време на употреба спре токът, незабавно изключете креслото с бутона "OFF", след което и от контакта, за да го предпазите от повреди.
- Не използвайте креслото, ако захранващият кабел е мокър или повреден.
- Лица под 14 годишна възраст или с физически или психически проблеми не бива да използват креслото без надзора на човек, отговарящ за тяхната безопасност.
- Не използвайте креслото веднага след ядене или в състояние на алкохолно или наркотично опиянение.
- Използвайте креслото само по предназначение според съответните инструкции.
- Използвайте само и единствено аксесоари, произведени за конкретния модел масажно кресло.
- За да избегнете повреда на креслото, моля не се изправяйте, не сядайте и не подскачайте върху възглавничките за стъпала.
- За да избегнете нараняване, моля не се опитвайте да седнете върху подлакътниците или облегалката.
- Моля почиствайте редовно креслото, за да предотвратите натрупването на мърсотия в процепите.
- За да изключите креслото, моля не дърпайте кабела, а хванете щепсела и го издърпайте от контакта.
- Когато настройвате облегалката или възглавничките за стъпалата, уверете се, че под тях няма нищо, което може да бъде прищипано или повредено.
- Креслото е предназначено само за домашна употреба.
- Ако захранващият кабел бъде повреден, трябва да се замени със същия модел кабел или друг кабел, подходящ за конкретния модел масажно кресло, но **само в оторизиран сервиз!**

Противопоказания



Ако не сте сигурни дали трябва да използвате масажното кресло, се консултирайте с Вашия личен лекар!

- Използването на масажното кресло е строго забранено при бременност, както и при следните оплаквания и заболявания: скорошни наранявания и травми, тромбозни заболявания, всякакъв вид възпаления, рак и др. Ако подлежите на някакъв вид медицинска терапия или се лекувате от заболяване, моля консултирайте се с личния си лекар, преди да използвате масажното кресло.
- Лица с психически, физически или когнитивни увреждания, както и лица без опит и познания за уреда, могат да използват масажното кресло само и единствено под надзора на лицата, отговорни за тяхната безопасност!
- За да се избегне дискомфорт и наранявания, когато се използва креслото, следните лица трябва да се консултират предварително с лекар:
 - лица с текущи здравословни проблеми;
 - лица подлежащи на редовни медицински манипулации;
 - лица с остри болки в гърба и проблеми с гръбначния стълб;
 - лица с пейсмейкър;
- Ако изпитате болка по време на масажа, незабавно го прекратете.
- Ако се нараните, докато използвате масажното кресло, незабавно потърсете медицинска помощ.
- Не се препоръчва да масажирате зачервени, подути или възпалени части от тялото.
- Масажното кресло е предвидено само за домашна употреба, като разтоварващ уред. Не може да се ползва като заместител на какъвто и да е вид терапия.
- Препоръчително е масажното кресло да се ползва максимално по 30 минути на ден. Отделните части на тялото - максимално по 15 минути. Всяко превишаване на препоръчителното време може да има обратен ефект.
- Този уред не е препоръчителен за лица под 14 годишна възраст.
- Не е препоръчително лица под 14 годишна възраст да бъдат оставяни без надзор около масажното кресло.



„Braintronics” функцията не се препоръчва за лица със следните заболявания:

- Различни видове психоза (шизофрения, биполарно разстройство, депресия)
- Раздвояване на личността
- Епилепсия, гърчове и др.
- Заболявания на сърцето
- Заболявания на централната нервна система
- Тромбоза
- Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност
- Скорошен инфаркт или инсулт
- Умствено увреждане
- Алкохолна, наркотична или медикаментозна зависимост
- Редовен прием на психотропни вещества
- Бременност


ВНИМАНИЕ! “BRAINTRONICS“ функцията не трябва да бъде използвана върху деца без изричното знание и разрешение на техните настойници.

Описание на продукта

1. Възглавница за врата
2. Въздушни възглавници за раменете
3. Джоб за дистанционно управление
4. Въздушни възглавници за ръцете
5. Седалка
6. Въздушни възглавници за прасците
7. Въздушни възглавници за ходилата
8. Облегалка
9. Подлакътник
10. Страничен капак

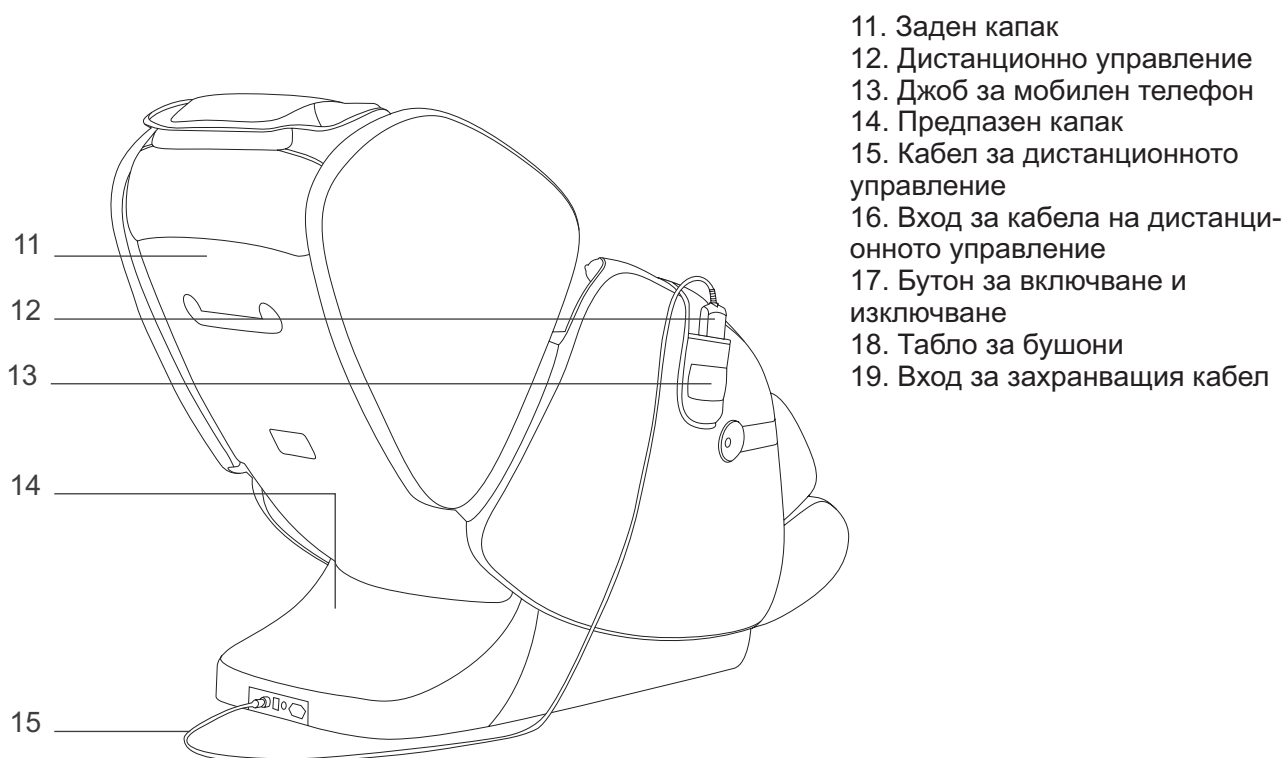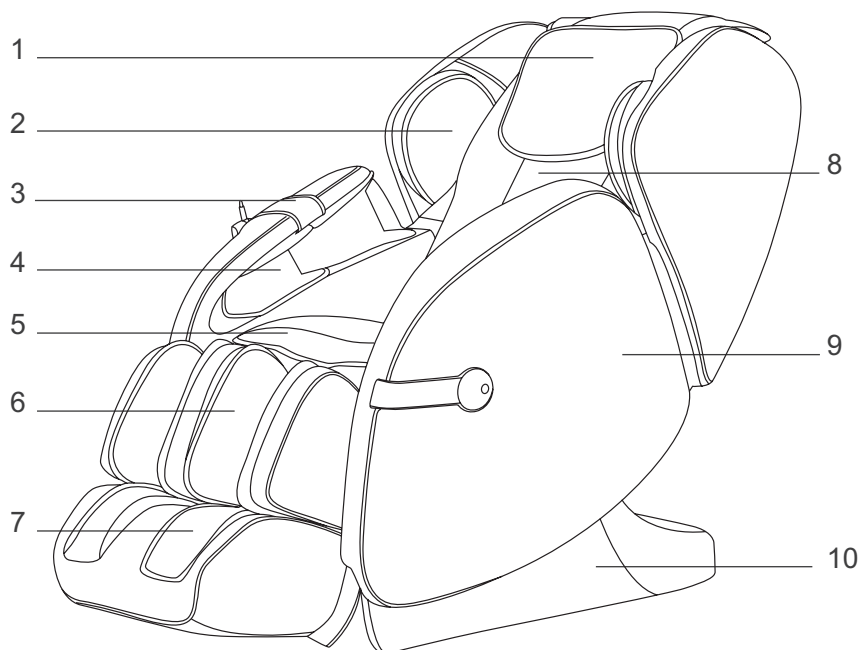

11. Заден капак
12. Дистанционно управление
13. Джоб за мобилен телефон
14. Предпазен капак
15. Кабел за дистанционното управление
16. Вход за кабела на дистанционното управление
17. Бутон за включване и изключване
18. Табло за бушони
19. Вход за захранващия кабел

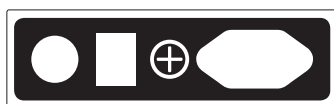

16 17 18 19

Дистанционно управление

1. Включване / изключване
2. Меню
3. Автоматични програми
4. Ръчни настройки
5. Повдигане / сваляне на възглавницата за ходилата
6. Позиция на „безтегловност“
7. Пауза
8. Назад
9. Допълнителни настройки
10. Повдигане / сваляне на облегалката и възглавницата за ходилата



SCREEN SETTING

- Настройки на дисплея


Shoulder height

- Височина на раменете


Setting

- Настройки

Дистанционно управление


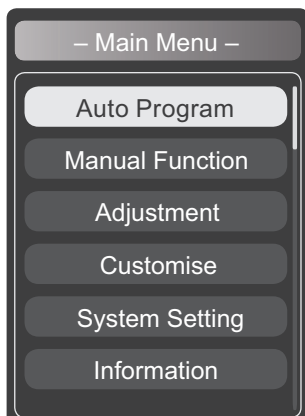


- ▶ Авт. Програми
- Demo Демонстрационна програма на всички функции
 - Yoga Цялостен стречинг ефект на цялото тяло чрез стимулиращ масаж.
 - Relax Масаж, релаксиращ мускулите и ставите и подобряващ кръвообращението.
 - Ease ache Дълбок масаж, който фокусира акупресурните точки с цел намаляването на напрежението в мускулите.
 - Fatigue Recover Дълбоко тъканен масаж, комбиниращ въздушните възглавници с разтриващ масаж. Подходящ за облекчаване на болки в ставите и мускулите.
 - Full Air Активира всички въздушни възглавници и ролери на ходилата.
 - Neck | Shoulder Масажираща програма за горната част на тялото.
 - Back & Waist Масажираща програма за долната част на тялото.

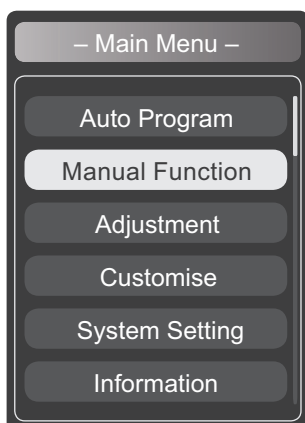



- ▶ Ръчни настройки
- ▶ Massage Mode Масажна функция
 - Stop Спира всички масажни функции
 - Knead OFF Масажна техника за намаляване на напрежението с 3 степени на скорост
 - Flap OFF Лек потупващ масаж с 3 степени на скорост и широчина
 - Knead & Flap OFF Комбинация от разтриване и потупване с 3 степени на скорост
 - Shiatsu OFF Шиаци масажът стимулира специфични части от тялото и отпуска мускулите. 3 степени на скорост и широчина
 - Knock OFF Потупващия масаж подпомага кръвообращението и облекчава напрежението в мускулите. 3 степени на скорост и широчина

Дистанционно управление

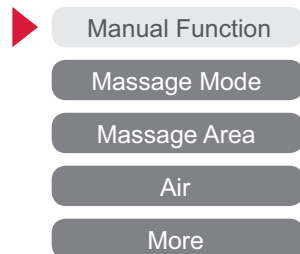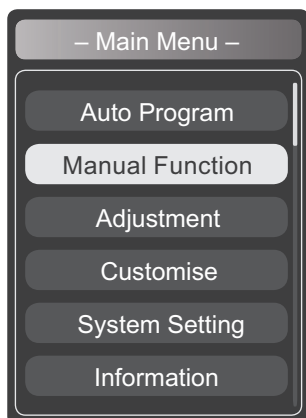


Масажни зони



- Масаж на конкретна точка
- Частичен масаж в определена зона
- Масаж на горната част на тялото
- Масаж на горната част на гърба
- Масаж на долната част на гърба
- Ако не бъде посочена зона за масаж, автоматично ще се включи "rolling" масаж

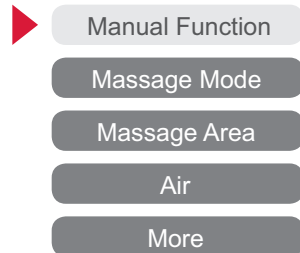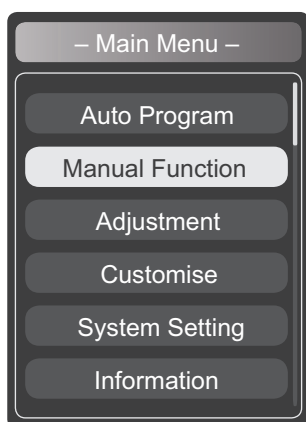


Въздушни възглавници

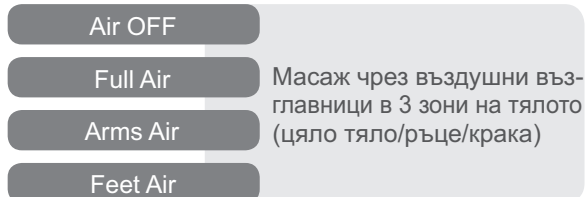

Масаж чрез въздушни възглавници в 3 зони на тялото (цяло тяло/ръце/крака)

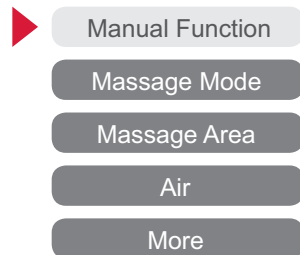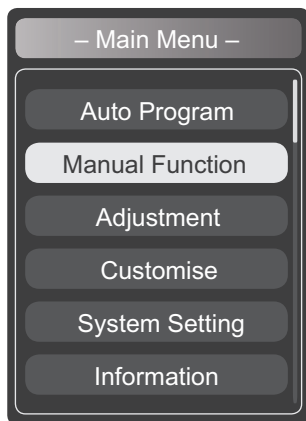







Други

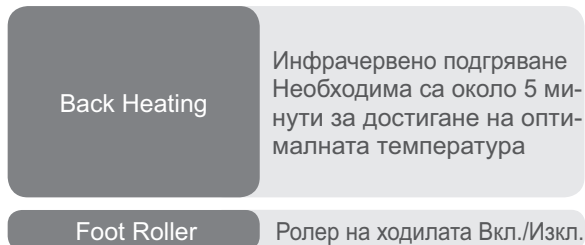


Инфрачервено подгриване
Необходима са около 5 минути за достигане на оптималната температура

Ролер на ходилата Вкл./Изкл.

Дистанционно управление

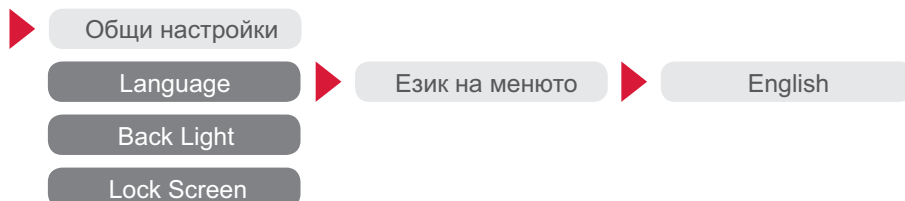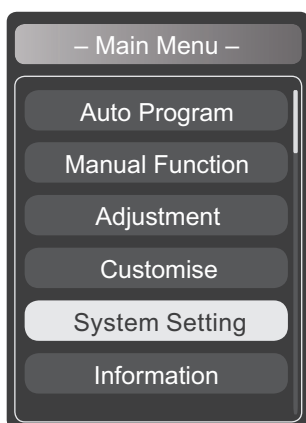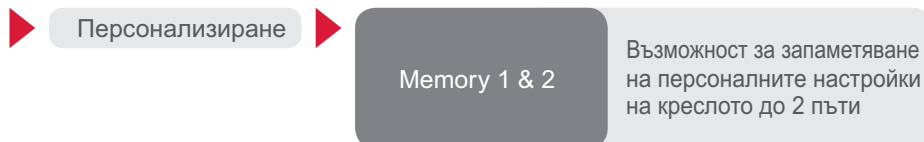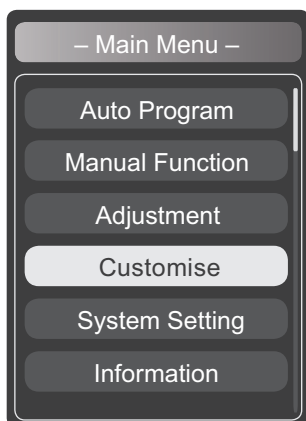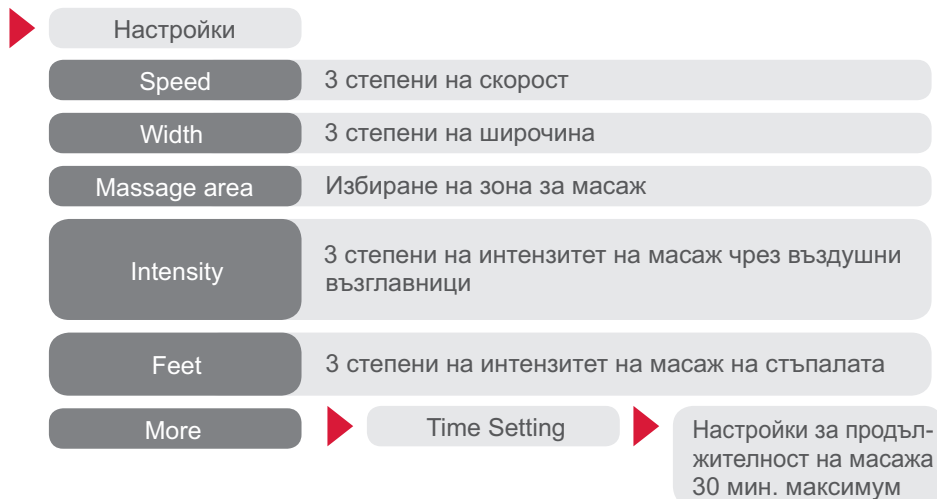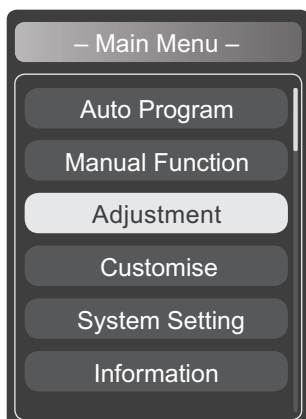

Дистанционно управление

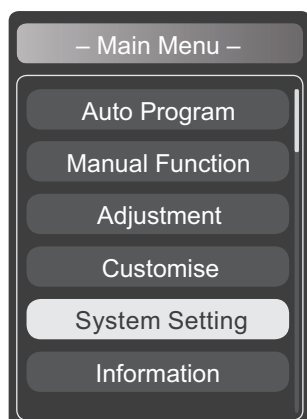

Общи настройки

Language


Back Light

Lock Screen

Автоматично заключване на екрана

Настройки:

- 15 секунди
- 30 секунди
- 1 минута
- 2 минути
- 3 минути
- без автоматично заключване

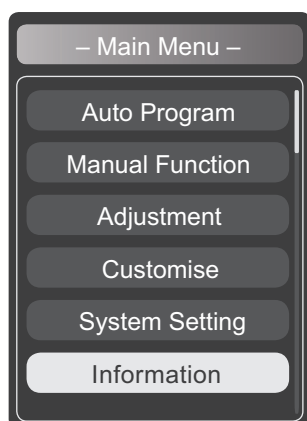

Информация

Serial No.

Индивидуален сериен номер на креслото

Инструкции за монтаж

1 – Монтиране на възглавницата за ходилата

- a) Първо свържете двете оси на възглавничката и се уверете, че винтовете са поставени правилно. Виж схема 1а.
- b) След като сте подготвили двете страни (виж схема 2а) свържете възглавничката.

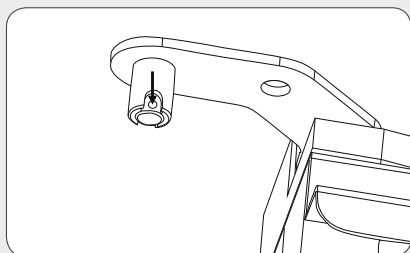


Схема 1а

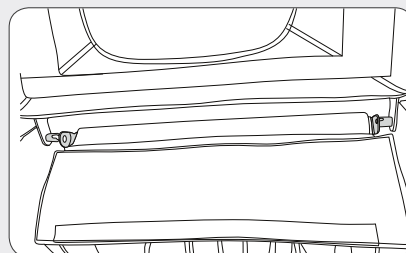


Схема 2а

- c) Затегнете винтовете на възглавничката от другата страна. Виж схема 3а.
- d) Възглавничката е закачена. Виж схема 4а.

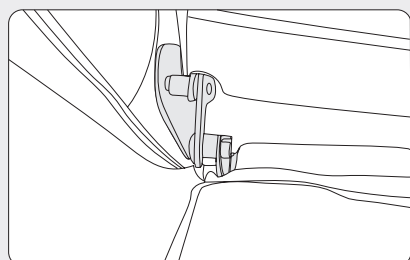


Схема 3а

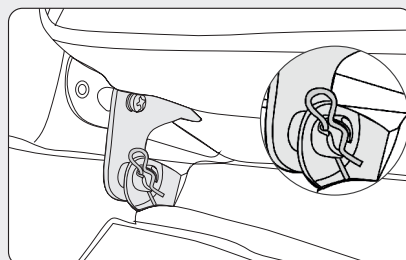


Схема 4а

- e) Свържете маркуча за въздушна компресия и захранващия кабел от възглавничката към маркуча и захранващия кабел от долната част на седалката

ВНИМАНИЕ!

- За да се избегне повреда по механизма на креслото, моля не повдигайте и не натискайте възглавничката за ходилата надолу и нагоре! Виж схема 1б.
- За да избегнете нараняване и дискомфорт, уверете се че масажираният механизъм е застанал в изходна позиция, преди да включите креслото. Виж схема 2б.

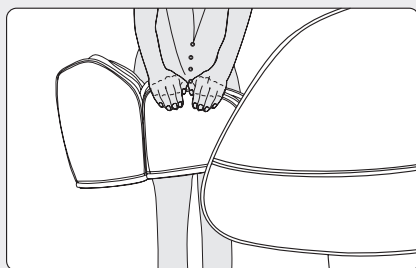


Схема 1б


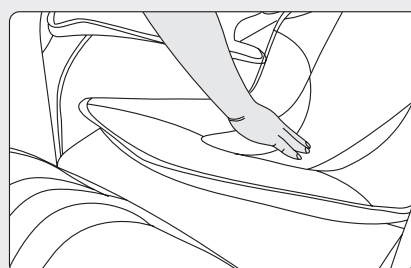


Схема 2б

Инструкции за монтаж


2 – Монтиране и използване на допълнителното шалте и възглавничка за врата

Свържете допълнителното омекотяващо шалте чрез ципа. Виж схема 1в. Свържете възглавничката за врата чрез велкро лентите на облегалката на креслото. Виж схема 2в. За да почистите шалтето и възглавничката, първо ги разкачете от масажното кресло. Препоръчително е креслото да се използва с омекотяващото шалте!

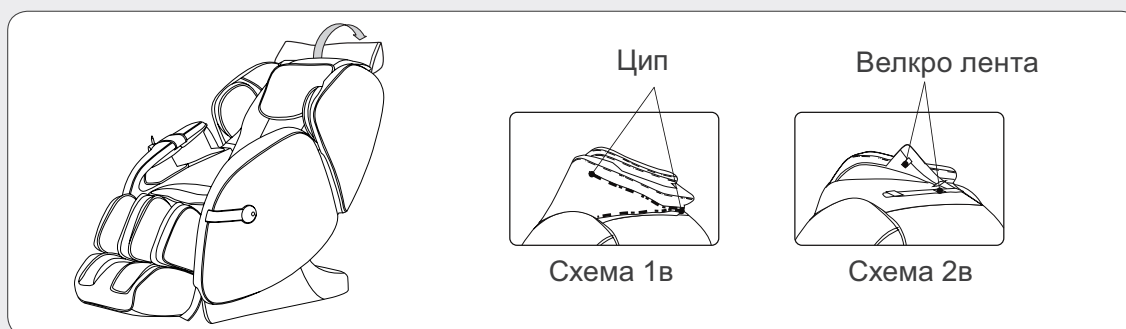

3 – Предпазване на пода

За да предотвратите износване или повреда на подовата настилка (ламиниран паркет, плочки, гранитогрес, подове от естествено дърво), е препоръчително да се постави килим или друг тип постелка.

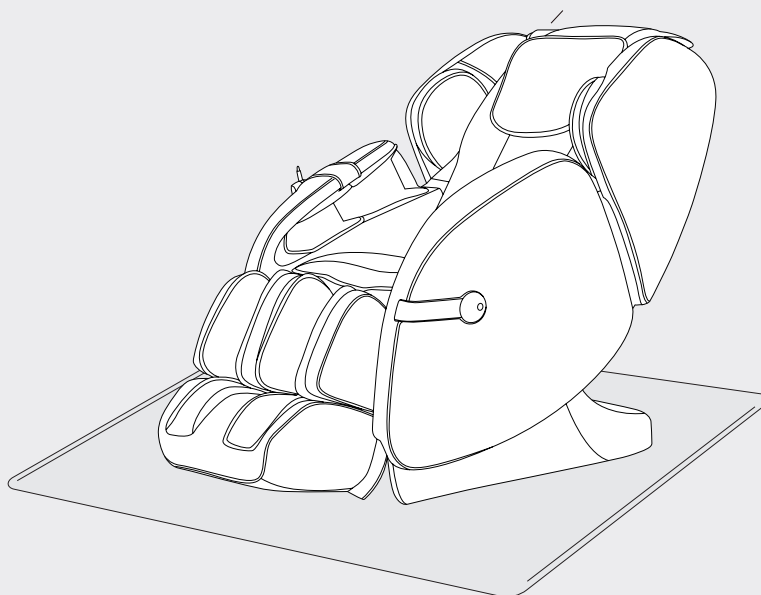

ВНИМАНИЕ!


Масажното кресло не трябва да бъде пренасяно, използвайки колелцата, по неравен под или по деликатни подови настилки! Пренасяйте от поне 2 лица и използвайте дръжката в задната част и предварително прибраната възглавничка за ходилата.

Инструкции за монтаж

4 – Включване на захранването на креслото




Включване

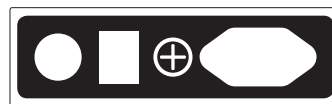


Бутон за включване

5 – Приключване на масаж

- При натискане на основния бутон за включване/изключване по време на масаж, ще се изключи масажното кресло, спирайки всички функции. Облегалката и възглавничката на ходилата се връщат в изходна позиция.
- Изключете креслото от контактната мрежа, след като сте го изключили.

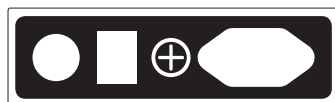


Бутон за изключване

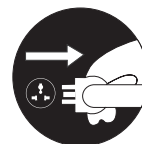

Изключване

6 – Пренасяне

Уверете се, че няма висящи кабели. Хванете креслото за облегалката и го преместете, използвайки колелцата до желаното място и внимателно го изправете

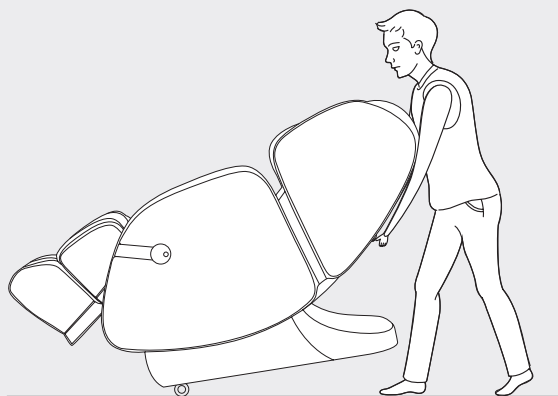

ВНИМАНИЕ!

Преди да преместите креслото, изключете захранващия кабел от контакта! Разкачете захранващия кабел и кабела на дистанционното, преди да преместите креслото!

Масажни техники



SHIATSU

Шиациу масажът е вид масажна терапия с произход от Япония. Тази масажна техника комбинира нежни и ритмични кръгови движения с ръцете, които достигат до всички части на гърба. Целта на масажа е да стимулира и раздвижи мускулите.




2D MASSAGE

Умният двуизмерен масажиращ механизъм позволява креслото да измери Вашия гръб, за да установи позицията на различните зони на гръбнака.




KNEADING

Разтриващият масаж притиска и раздвижва мускулите, имитирайки движения с ръце. Тази техника има за цел да облекчи напрежението в мускулите.

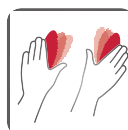


FLAP

Тази техника стимулира кръвообращението в мускулите и отпуска сухожилията, чрез леки потупвания и движения с дланите на ръцете. Намалява напрежението.

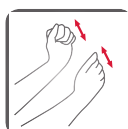

TAPPING

Потупващ масаж. С къси и силни потупвания с ръба на ръката, тази техника подобрява кръвообращението в кожата и отпуска схванатите мускули. Ако се използва на нивото на гърдите, подпомага отделянето на секрети от белите дробове.

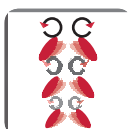

KNEAD & FLAP


Комбинация от разтриващ и потупващ масаж.



ARTHROSE TRACTION

Тази функция нежно разтрива, въздействайки стимулиращо върху хрущялите, което подпомага усвояването на хранителните вещества и облекчава симптомите на артроза.

Масажни техники

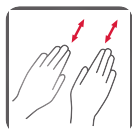


ROLLING

Приятна масажна техника за релаксация и успокояване на мускулатурата. Подходяща техника за край на масажа. Подобрява мускулния тонус.



CARBON HEATING

Карбоновите елементи на масажното кресло осигуряват равномерно подгряване. Топлината прониква на дълбочина в тъканите. Кръвоносните съдове се разширяват, кръвообращението се подобрява, мускулите се отпускат. Успокоява и нервните окончания, което допринася за успокояването на болката при схващания.

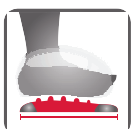

GUA SHA

Тази техника от китайската медицина разширява кръвоносните съдове на повърхността на кожата и стимулира кръвообращението. Често се прилага в комбинация с акупресура на 'shu' точките за допълнителна стимулация на цялото тяло.



AIR COMPRESSION

Притискащите и отпускащи движения при масаж с въздушни възглавници създават естествени рефлексии в мускулите. Това е изключително благоприятно в областта на прасците и ходилата.




BLUETOOTH

Безжично прехвърляне на данни.



BRAINTRONICS

Тази технология синхронизира Вашите мозъчни вълни чрез аудио сигнали в комбинация със специално разработена масажна програма. Вашето тяло и ум ще могат да се отпуснат и да отпочинат, без значение с каква цел ще използвате функцията (релакс, сън, стимулация)

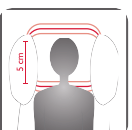

ADJUSTABLE PILLOW

При необходимост двойната възглавница може да се използва за омекотяване на масажа в областта на врата и раменете.

Масажни техники



SL-SHAPE

SL- образна форма: Благодарение на специалната ергономична “SL” - образна извивка, обхвата на масажирщите глави е 135 см. Това Ви позволява да се наслаждавате на персонален масаж на цялото тяло, от главата до бедрата. Облегалката на креслото е с “S”- образна извивка и нежно поддържа гръбнака.



ZERO SPACE

При легнало положение креслото се премества напред и следователно изисква по-малко дистанция от стената отзад. Спестява място и е удобно!



ZERO GRAVITY

Поставете се на мястото астронавтите - това невероятно усещане за безтегловност.




AUTOMATIC

9 специално разработени автоматични програми за цялото тяло, които предлагат голямо разнообразие от различни масажни техники. В допълнение, можете да си включите подгряващата функция.



MEMORY

Използвайки функцията за запомняне, масажното кресло запаметява Вашите предпочитани настройки и започва работа, без да се налага допълнително настройване. Можете да запомните до две комбинации настройки с бутоните “M1 и M2”.

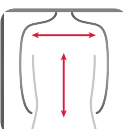

BACK AREA

Регулируем размер на масажната зона.



ADJUSTABLE FOOTREST

Възглавничката за ходилата може да се настрои за всякакъв ръст.



RECLINING POSITION

Отделните настройки на облегалките спомагат за индивидуалното удобство и комфорт на тялото.

Масажни техники



HUMAN HANDS FEELING

Специално разработените масажирски глави имитират движенията на професионален масажист. С максимално разстояние от 6.5 см и ъгъл от 41 градуса, механичните ръце са ефективни при масаж на шийни, лумбални и гръбначни прешлени.




ADJUST SHOULDER

Масажирските глави могат да бъдат преместени нагоре или надолу до удобна за всеки позиция за масаж на раменете.



AIR INTENSITY

Силата на масажа с въздушни възглавници може да бъде променена.

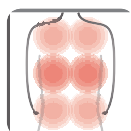

AIR AREA

Три зони на масаж с въздушни възглавници - цяло тяло, ръце и крака, долна част на тялото.




SPOT

Масажирските глави могат да бъдат настроени да масажират определена точка.




SPEED

Скоростта на масажа може да бъде променена.

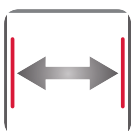

WIDTH

Разстоянието между масажирските глави може да бъде променено на тясно, средно или широко.

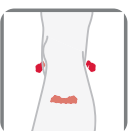

ACUPRESSURE POINTS

Основните акупресурни точки могат да бъдат масажирани.



YOGA

Фокусираните масажи за разтягане тонизират и освежават цялото тяло.

Отстраняване на неизправности

Неизправност

- Шумът от електромотора се чува по време на работа.
- Дистанционното управление не работи.
- Креслото спира работа.
- Braintronics функцията не работи.

Отстраняване

- Това е нормален шум по време на работа.
- Уверете се, че кабелът на дистанционното е правилно включен в съответния вход. Проверете дали креслото е включено в мрежата. Проверете кабела на дистанционното.
- Масажното кресло се самоизключва след зададеното му време или след продължителна употреба. Това удължава живота на креслото и предотвратява повреди.
- Уверете се, че апликацията е успешно инсталирана и Вашият акаунт е активиран. Проверете дали Bluetooth връзката е осъществена между Вашето мобилно устройство и масажното кресло.

Съхранение и грижи

- Ако уредът не се използва дълго време, захранващият кабел трябва да бъде разкачен от креслото. Препоръчително е масажното кресло да бъде съхранявано в сухо помещение.
- Не съхранявайте креслото при високи температури или в близост до открит пламък. Избягвайте да държите масажното кресло продължително време на пряка слънчева светлина.
- Почиствайте само със специални препарати за изкуствена кожа. **НЕ почиствайте креслото, използвайте разреждители, препарати на базата на бензол или спирт.**
- Ако креслото е поставено на неравен под, не го дърпайте или бутайте! За да го преместите го вдигнете.
- Препоръчително е да правите почивки между масажите. Не използвайте креслото многократно, без да правите почивки!

Характеристики

Размери:	в изправено положение: 76 x 110 x 143 см в хоризонтално положение: 76 x 98 x 168 см
Тегло:	92 кг
Волтаж:	220-240V ~ 50/60Hz
Мощност:	150 W
Оперативно време:	20 минути
braintronics:	21 минути
Сертификати:	




Декларация за съответствие

Отговаря на Европейския стандарт за регулация EMC 2014/30/EU и LVD 2014/35/EU.


BRAINTRONICS




Технологията

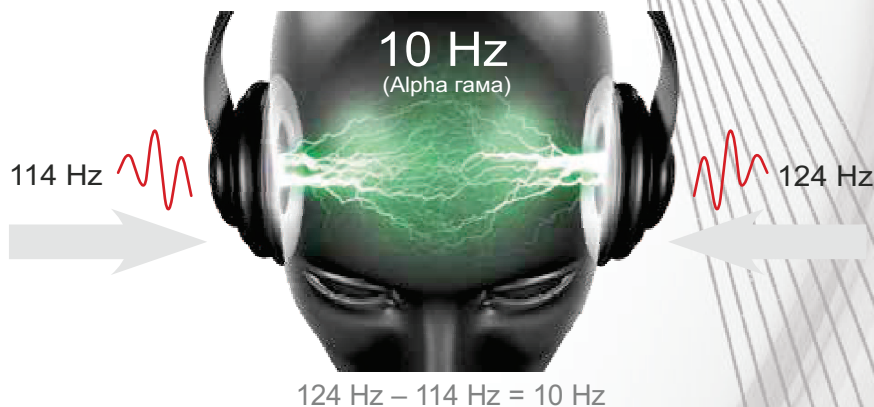


Главната цел на Braintronics е да синхронизира ефективно мозъчните вълни до желаното състояние на мозъчна активност. Без значение дали искате да релаксирате, сънувате или учите - всичко е възможно. При редовно използване, системата Body&Mind (Тяло&Ум) постепенно ще „научи“ мозъчните Ви вълни да се справят със стреса, да преодоляват тревожността, да бъдат по-балансираны и да се повиши физическата и умствената продуктивност.

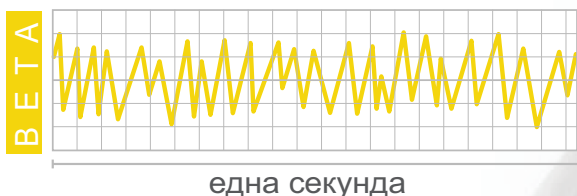


- Бета диапазон** | честота 14 – 30 Hz
- > Състояние на тревога
 - > Фокусиране
 - > Умствена дейност
 - > Логично / Аналитично мислене

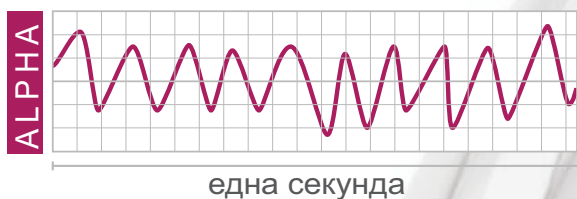

- Алфа диапазон** | честота 7 – 14 Hz
- > Отпуснато състояние и заспиване
 - > Креативност
 - > Спокойствие

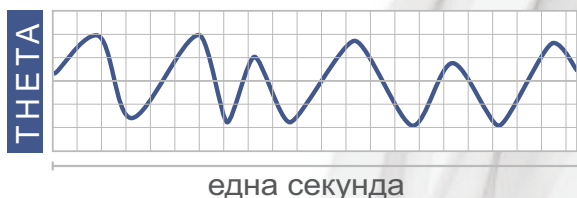


- Тета диапазон** | честота 3 – 7 Hz
- > Състояние на сън
 - > Най-дълбоката релаксация
 - > Пластична памет
 - > Изключителна креативност и въображение

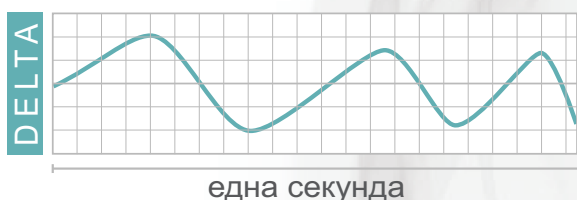

- Делта диапазон** | честота 1 – 3 Hz
- > Дълбок сън
 - > Транс

Технологията

Аудио стимулацията на мозъчни вълни Braintronics обикновено започва в долния Бета честотен диапазон. За по-лека и умерена синхронизация, системата бавно насочва Вашите мозъчни вълни до горните, а след това до долните Алфа честоти. Аудио стимулацията използва Тета и Делта вълни за регенерация и дълбока релаксация.

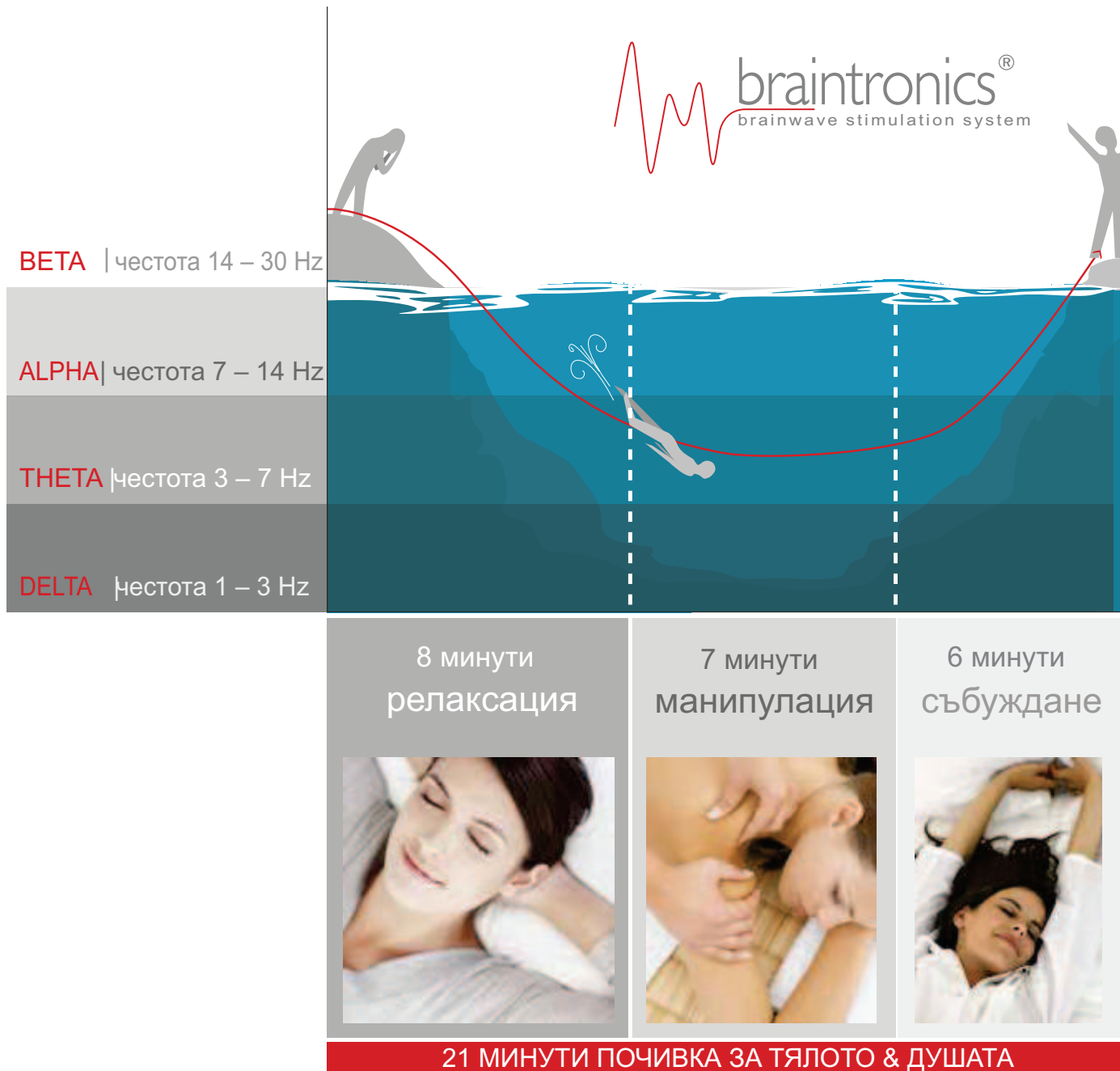

BMS – Синхронизираща система Тяло&Ум (Body&Mind)



Системата Тяло&Ум (BMS) синхронизира Вашите мозъчни вълни чрез аудио стимулация. Системата, съчетана със специално развита масажна програма, помага на стресираното Ви тяло да релаксира. Изследвания показват, че когато се комбинират масаж и стимулация на мозъчните вълни, състоянието на релаксация е до 80% по-ефективно. Резултатите от изследванията показват, че целенасочената стимулация на мозъчните вълни подобрява концентрацията и продуктивността, и осигурява умствено и физическо облекчение.



BMS – Синхронизираща система Тяло&Ум (Body&Mind)

Увлечението на мозъчните вълни работи с електрическите реакции на мозъка. То отговаря на ритмична и/или сензорна стимулация, като звукови и светлинни импулси.

Когато мозъкът е изложен на стимулация, като звук в ушите, светлина в очите и др., той отговаря на тези стимулации с така наречената кортикално предизвикана реакция. Тези електрически импулси могат да бъдат измерени в рамките на мозъка и са винаги в отговор на това, което виждаме и чуваме. Мозъчната активност може да бъде измерена чрез чувствителни електроди, поставени върху скалпа.


ЕЕГ (Електроенцефалограма) тестове показват, че мозъкът е индуциран да съответства с определени честоти. Процесът, с който мозъкът изравнява преобладаващата честота на мозъчните вълни с входящата честота, се нарича „увлечение“.

Не винаги хората сме способни да се мотивираме сами, което е напълно нормално. В такъв случай BMS системата може да бъде наше убежище. Медитация, комбинирана със синхронизация на мозъчните вълни и хубав масаж - това е цялостната концепция на системата „Тяло&Ум“.

Мотивацията и продуктивността на работниците намалява, поради увеличаване на изискванията, без осигуряване на баланс за тялото и мозъка. Умственото изтощение спомага за психическа и физическа отпадналост. BMS системата позволява на работодателя да има активно въздействие върху благосъстоянието на служителите си. С натискането на един бутон потребителят се потапя в свят на спокойствие и релаксация, след което продължава работния си ден ободрен и фокусиран.

Ползите от Braintronics

- > Облекчение на стреса
- > Дълбока релаксация само след няколко минути
- > Спокойствие
- > Устойчивост на стрес
- > Баланс на тяло и мозък
- > Подобрена концентрация
- > Подобвени реакции
- > Повишена продуктивност
- > Повишена мозъчна активност
- > Интуитивно взимане на решения
- > Медитативно преживяване
- > Умствена сила
- > Подобрена мотивация
- > Енергия и жизненост
- >

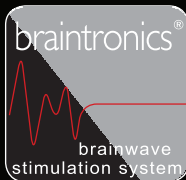


BRAINTRONICS® APP

MANUAL

- ! Преди да започнете braintronics® сесия се уверете, че Вашият уред Casada е свързан с източник на захранване, както и че Bluetooth е активиран на Вашия смартфон/таблет и имате активна интернет връзка.

Инсталиране чрез APP STORE

1. Отворете Play Store / App Store на Вашия смартфон или таблет.
2. Търсете за приложението braintronics®.
3. Инсталирайте приложението.

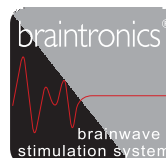


Инсталиране чрез QR CODE

1. Сканирайте този QR код, използвайки телефона/таблета си.




2. Кодът ще Ви препрати към приложението. Инсталирайте го.

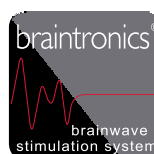


Създаване на акаунт

След като сте инсталирали приложението за първи път, трябва да създадете Ваш потребителски акаунт.

За да направите това, кликнете на „Create Account“ (Създай акаунт, фиг. 1). Въведете нужните данни, след което кликнете отново на „Create Account“ (фиг. 2).

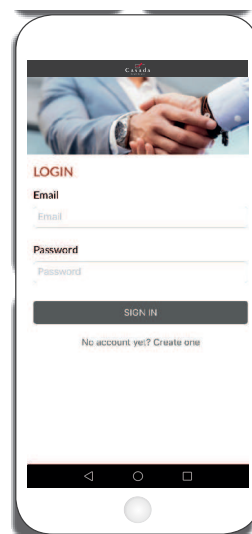

фиг. 1

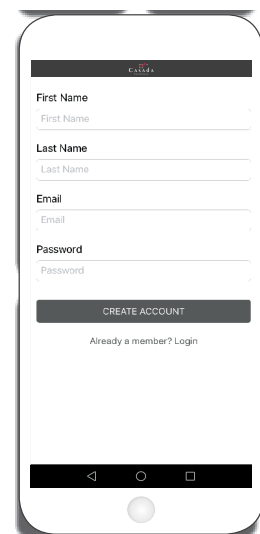


фиг. 2

Вход и меню

Въведете Вашия имейл и паролата си, след което кликнете на „Sign in“ (Вписване).


След успешен вход на екрана ще се появи главното меню на приложението.

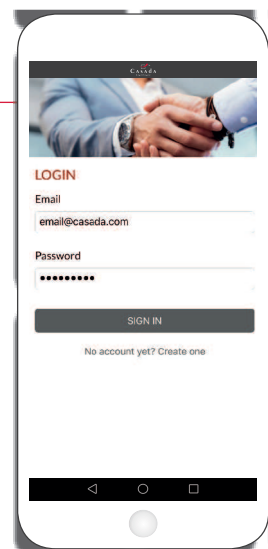


Език

За да изберете език, с който да работи приложението, натиснете бутона във формата на колело, намиращ се в горния десен ъгъл и задайте желаните език (фиг. 1).

Върнете се към главното меню като кликнете на стрелката в горния десен ъгъл или бутона за връщане назад на Вашия смартфон / таблет (фиг. 2).

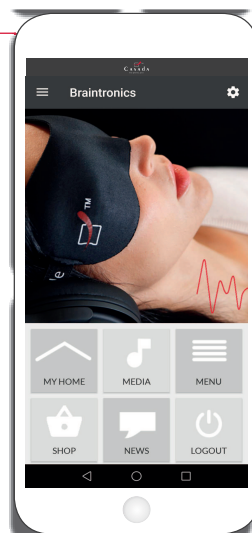


фиг. 1

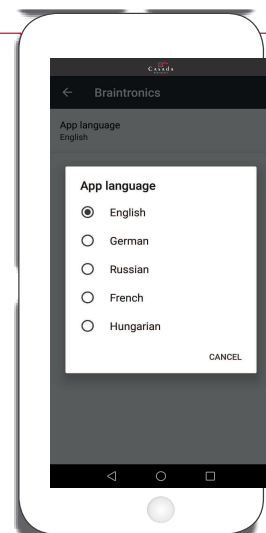


фиг. 2

Пазаруване


1. Изберете езика, на който искате да говори приложението (фиг. 1).
2. Изберете една от категориите с мелодии за релаксация и медитация, от която искате да слушате (фиг. 2).
3. При регистриране на Вашия уред, получавате една мелодия безплатно. Останалите мелодии в приложението са платени. Изберете определена мелодия от категорията (фиг. 3).
4. Потвърдете закупуването на мелодията, натискайки бутон „Buy“ (фиг. 4).
5. За да влезете в детайлното меню, кликнете на бутона с три линии в горния ляв ъгъл (фиг. 5).

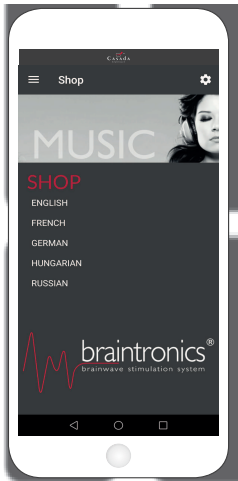


фиг. 1

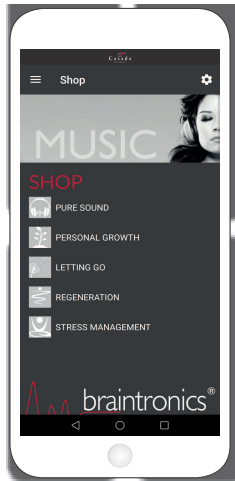


фиг. 2

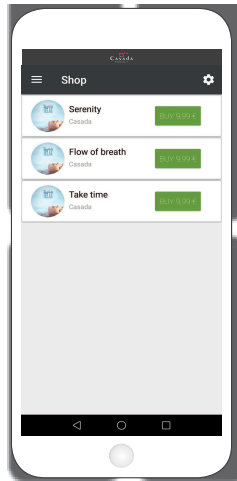

фиг. 3

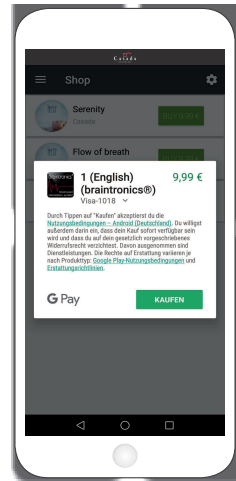

фиг. 4

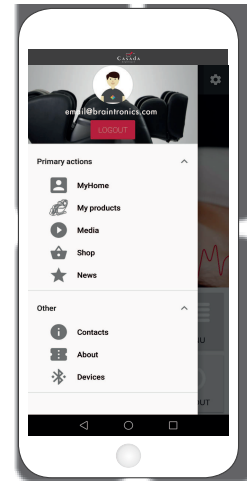


фиг. 5


Моите продукти

В категория „My products“ (моите продукти) можете да регистрирате Вашия уред Casada, който има функция braintronics (фиг. 1).

Изберете Вашия продукт от листа с предложените такива (фиг. 2).

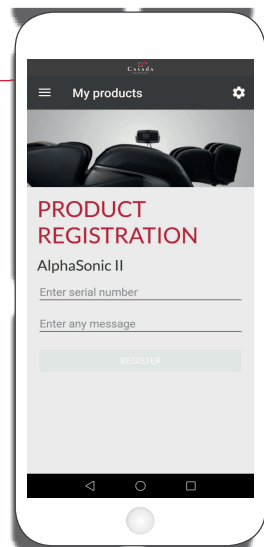

фиг. 1

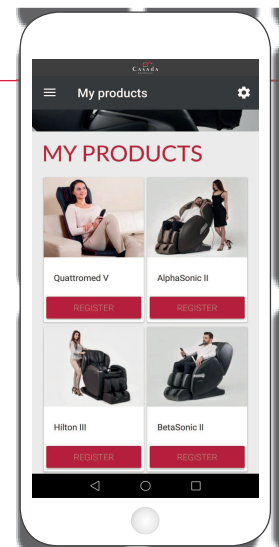

фиг. 2


Bluetooth връзка с Android

1. Кликнете на „Devices“ в менюто (фиг. 1).
2. Кликнете „Allow“ („Позволи“), фиг. 2.
3. От листа с изброени продукти на Casada, изберете желаните от Вас продукти и се свържете с устройството с парола 1234 (фиг. 3).


* За да изберете масажирания модул на креслото, изберете BLUETOOTH устройството с разширение „BT“

Bluetooth връзка с iOS


1. Кликнете на „Devices“ в менюто (фиг. 1).
2. Ако Bluetooth все още не е активиран (фиг. 4), плъзнете бутона в горния десен ъгъл надясно, като той трябва да се оцвети в зелено (фиг. 5).
3. От листа с изброени продукти на Casada, изберете желанието от Вас продукт, който искате да използвате (фиг. 5).

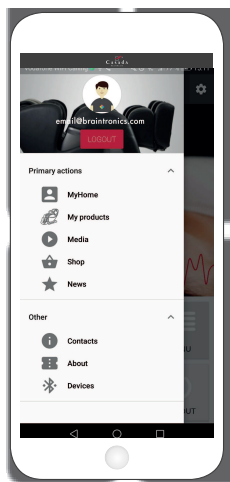


фиг. 1

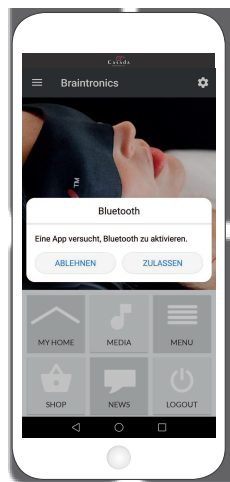


фиг. 2

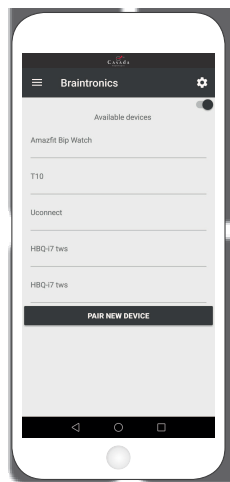

фиг. 3

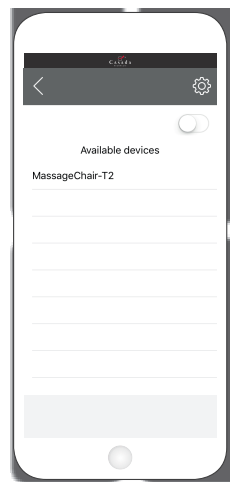





фиг. 4

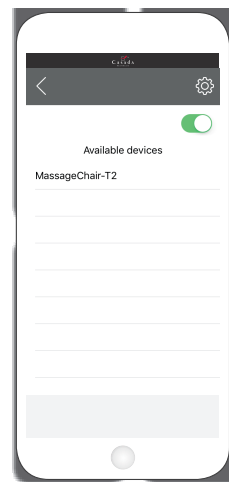

фиг. 5

Медия и Плейър

За възможно най-добро и цялостно преживяване от Braintronics Ви препоръчваме да използвате системата, като включите качествени стерео слушалки към смартфона/таблета си. По този начин ще изключите външния свят изцяло и ще постигнете точната цел на програмата. Кликнете бутон „Media“ („Медия“) в менюто и изберете желаната мелодия. След потвърждение приложението автоматично пуска мелодията и масажната програма Braintronics. Можете да сложите на пауза, за да излезете от приложението по-рано или да смените мелодията.

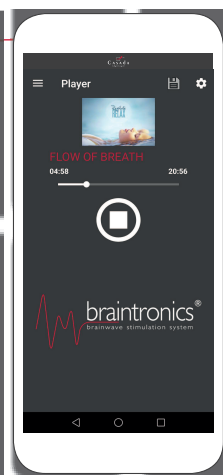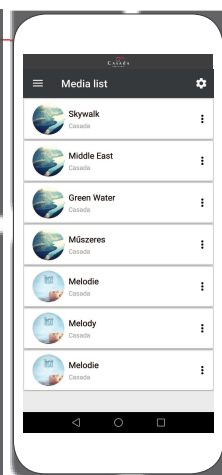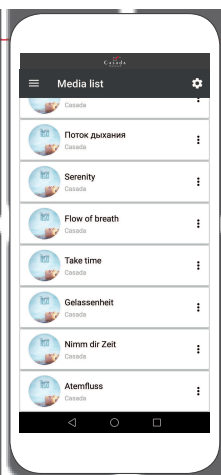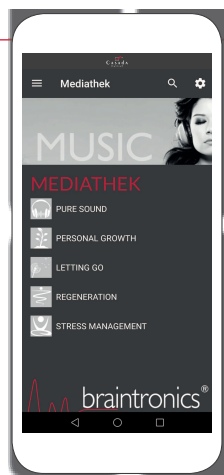

Новини

В секция „News“ („Новини“) ще получавате новини, когато има нова мелодия. Също така там се публикуват и интересни статии и информация на теми, свързани със стрес, релаксация, масаж и медитация и др.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

- Заявка за ремонт на закупената стока се приема в устна или писмена форма, на адреса на седалището на фирма „Ню Вижън Бутик“ ЕООД или на адресите, посочени в тази гаранционна карта.
- При подаване на заявка за ремонт-рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
 - Гаранционна карта;
 - Касова бележка или фактура;
 - Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 - Други документи, установяващи претенцията по основание и размер;
 - Гаранционната карта трябва да бъде попълнена изчерпателно и четливо. Тя трябва да съдържа модел, фабричен номер (ако има), подпис на клиента, дата на покупката. Непопълнени или подправени гаранционни карти са невалидни.
- Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
 - При несъответствие между данните в документите и самата стока или опит за подправяне на гаранционната карта.
 - Когато е правен опит за ремонт, монтаж или демонтаж;
 - Когато не са спазени условията за експлоатация, съхранение и транспорт;
 - При причинени повреди от неправилно боравене, претоварване, механични повреди, сътресение, удар, въздействие на температура, влага или други фактори, извън допустимите граници, прах, предмети, растения, животни или др.
 - При токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, форсмажорни обстоятелства или други външни въздействия извън контрола на производителя, вносителя, търговеца или сервиза.
 - При използване на стоката не по предназначение, както и използването на битови уреди за професионални или търговски цели, в заведения, хотели, отдаване под наем и др.
 - При работа с нестандартна захранваща система с други неподходящи или нестандартни устройства, с нестандартна кабелна мрежа, неоригинални зарядни устройства, батерии, консумативи, носители и др.
- На гаранционно обслужване не подлежат:
 - Всички външни части, които могат да бъдат повредени по невнимание от клиента, аксесоари, шалтета, тапицерии, адаптери, батерии, кабели, предпазители, дистанционни управления, както и непознаване инструкцията за експлоатация на уреда.
- При предявяване на рекламация, отговаряща на изискванията на гаранционните условия, търговецът е длъжен по своя преценка да:
 - Отремонтира стоката в законовия срок. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, срокът за ремонта се прибавя към гаранционния срок.
 - Ако ремонтът на стоката е невъзможен или неоправдан, да я замени с нова от същия модел. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяната на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребител гаранционните условия.
 - Ако няма същия модел, да предложи аналогичен или друг модел с доплащане или възстановяване на заплатената сума.
 - В случай, че не бъде извършена замяна на потребителската стока, или не се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя, той може да иска разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума или намаляване на цената.
 - Производителят, вносителят, търговецът или сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи, престой или други, вследствие на дефекта на стоката или престоя ѝ в сервиза.
 - По време на престоя на стоката в сервиза, сервизът не е длъжен да осигурява обратно друга стока.
- При получаване на отремонтираната стока:
 - Потребителят е длъжен да се убеди в качеството и обема на извършения ремонт преди да получи стоката си обратно.
 - Частите, заменени при ремонта, остават в сервиза за по-нататъшно отчитане.
 - Ако при диагностиката на стоката се установи, че тя е изправна и отговаря на техническата си спецификация, или дефектът е извънгаранционен, сервизът може да таксува клиента, съобразно извършената услуга по установения ценоразпис за не-гаранционно обслужване.
 - При съгласие се подписва Протокол за споразумение.
 - При несъгласие се попълва Констативен протокол.

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП и по-точно, независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.
Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за покупко-продажба.

ВНИМАНИЕ:

1. Рекламации за не-комплектованост и външни видими дефекти на стоката се признават само по време на покупката.
2. Претенции за дефекти и липси не се признават, когато стоката е закупена като преоценена.

Верига магазини New Vision Boutique:

Централен офис: гр. София, Студентски град, Ул. „Иван Багрянов“ 19, вх. А, ет. 1, ап. 4, Тел: 02/962 86 86, 0888 705 116
www.vip-giftshop.com www.cookandhome.bg

СОФИЯ

Щанд в Хипермаркет Технополис Младост
Ж.к. Младост 4, Околовръстен път № 265
Тел: 0884 123 501

Щанд в Хипермаркет Технополис Люлин
Бул. Царица Йоана (до метростанция Люлин)
тел: 0884 142 351

Щанд в Хипермаркет Технополис The Mall
Бул. Цариградско шосе № 115
Тел: 0887 103 914

ПЛОВДИВ

Щанд в Хипермаркет Технополис
Бул. Санкт Петербург № 133 (до Метро)
Тел: 0885 306 708

СТАРА ЗАГОРА

Щанд в Хипермаркет Технополис
Ул. Никола Петков № 50
Тел: 0885 306 735

ВАРНА

Щанд в Хипермаркет Технополис
Бул. Владислав Варненчик № 277 (до Елпром)
Тел: 0884 601 427

Магазин New Vision Boutique, МОЛ Варна, партер
Бул. „Владислав Варненчик“ № 186
Тел: 0884 614 287

БУРГАС

Щанд в Хипермаркет Технополис
К-с Славейков № 94 (до РУМ Младост)
Тел: 0884 620 997

Щанд в хипермаркет Технополис
ул. "Транспортна" № 53
Тел: 0887305596

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви за Вашия избор!

Моля, прочетете внимателно условията за гаранционно обслужване, както и инструкцията за експлоатация и следете за стриктното им изпълнение. Изисквайте точното и пълно попълване на всички позиции от гаранционната карта! Пазете касовата бележка!

ВИД ПРОДУКТ	Масажно кресло
МОДЕЛ	"BetaSonic 2" CMS - 535
ФАБРИЧЕН НОМЕР	
ДАТА НА ЗАКУПУВАНЕ	
ГАРАНЦИОНЕН СРОК	24 месеца (2 години)
МАГАЗИН/ОБЕКТ	
ПРОДАВАЧ	
СЕРВИЗ (ПЕЧАТ)	

Купувач:..... Тел:.....

Адрес:.....

Запознат съм и приемам условията на гаранцията!

Стоката е изпробвана и предадена с пълна комплектация и документация!

.....

(Подпис на купувача)

С тази гаранционна карта НЮ ВИЖЪН БУТИК ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, 1766, Околовръстен път 265, Хипермаркет Технополис, поема настоящите гаранционни задължения към потребителите и определя реда за извършване на рекламации при доказани гаранционни събития. Тази гаранция се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България. Търговците и продавачите на едро и дребно нямат право да допълват или да изменят условията на тази гаранция.

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупка, а при лизинг – от датата на получаване на стоката. Настоящата търговска гаранция е валидна само на територията на Република България.

* * *

I. Информация за правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 -115 от Закона за защита на потребителите:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

II. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите.

Ню Вижън Бутик ЕООД

Централен офис: гр. София, Студентски град, Ул. „Иван Багрянов“ 19, вх. А, ет. 1, ап. 4, Тел: 02/962 86 86, 0888 705 116
www.nvb-bg.com www.vip-giftshop.com www.cookandhome.bg